


Online-Anmeldung PAG-Test HerdePlus | HerdeComfort

1. Anmeldung über www.lkv.bayern.de im LKV-Portal
(mit HIT-Anmeldedaten)
2. Auf das Modul „Zustimmungen“ gehen, dort unter
„Zustimmungen“ „Mögliche Zustimmungen“ anklicken



3. PAG-Test HerdePlus oder PAG-Test HerdeComfort
auswählen (durch Klick auf Pfeil)

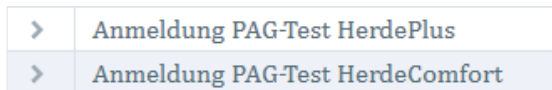

4. Im letzten Schritt Zustimmung erteilen und bestätigen

Zustimmung erteilen

Bestätigung ✕

Zusätzliche Eingaben:

Benachrichtigung PAG-Ergebnisse Per Post ▼


Wollen Sie diese Zustimmung wirklich erteilen?

Abbrechen **Zustimmen**

NEU

PAG-TEST HerdePlus | HerdeComfort

Den Trächtigkeitsstatus im Blick!

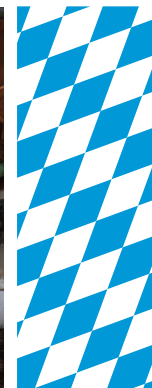

Was ist der PAG-Test?

Der PAG*-Test misst den PAG-Spiegel in der Milch und gibt damit Hinweise auf den Trächtigkeitsstatus der Kuh.

- PAGs sind Eiweißbaustoffe, die nur während der Trächtigkeit gebildet werden.
- PAGs können ab dem 28. Trächtigkeitstag in der Milch gemessen werden.
- Bei richtiger Anwendung erreicht der Trächtigkeitstest über die Milch eine Sicherheit von 98,8 %.

Voraussetzungen

- Die letzte Besamung muss mind. 28 Tage zurückliegen.
- Die letzte Kalbung muss mind. 60 Tage zurückliegen.
- Schnelle Besamungsmeldung

Ihre Vorteile

- Kein Mehraufwand, es läuft automatisch
- Kein Eingriff am Tier
- Ganze Herde im Blick
- Monatlicher Check
- Verringerte Zwischenkalbezeit durch frühen Trächtigkeitshinweis
- Bestätigungstest → Hinweise auf möglichen embryonalen Tod
- Praktisch: spart Tierselektion

Zusätzlicher Vorteil bei PAG-Test HerdeComfort

- Spätrträchtigkeitstest bei allen PAG-Testdurchläufen
→ Vermeidung von Trockenstellen nicht-trächtiger Kühe

PAG-Test HerdePlus

Nach einer gemeldeten Besamung wird automatisch beim nächsten Probemelktermin ein Bestätigungstest durchgeführt.

Tag 0	PM ab Tag 28	Folge-PM	Wie geht's weiter?	
Besamung	1. PM PAG positiv	2. PM PAG positiv	keine weiteren Tests	
Besamung	1. PM PAG positiv	2. PM PAG negativ	dritter Test ab 160. Tag nächstes PM: PAG negativ	kein weiterer Test
			dritter Test ab 160. Tag nächstes PM: PAG positiv	neuer Test, danach Testung beendet
Besamung	1. PM PAG negativ		erneute Besamung, dann: neuer Test	

Setzen Sie
noch einen
Test oben
drauf!

PAG-Test HerdeComfort

Zusätzlich zu PAG-Test HerdePlus wird bei HerdeComfort stets ein weiterer Test, der Spätrträchtigkeitstest, ab dem 160. Trächtigkeitstag durchgeführt.

Tag 0	PM ab Tag 28	Folge-PM	Wie geht's weiter?	PM ab Tag 160
Besamung	1. PM PAG positiv	2. PM PAG positiv	dritter Test ab dem 160. Tag	Spätrträchtigkeitstest
Besamung	1. PM PAG positiv	2. PM PAG negativ	dritter Test ab 160. Tag nächstes PM: PAG negativ	kein weiterer Test
			dritter Test ab 160. Tag nächstes PM: PAG positiv	neuer Test, danach Testung beendet
Besamung	1. PM PAG negativ		erneute Besamung, dann: neuer Test	

* PAG = Pregnancy associated Glycoprotein